



IRIGASIN Zestaw (saszetki 12szt.+butelka)



Cena: 30,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	12 sasz.
Postać	-
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Irigasin Zestaw do płukania nosa i zatok irygator + saszetki przyczynia się do wyraźnego oczyszczenia jam nosowych i zatokowych. Wspomaga oddychanie i przynosi ulgę m.in. przy katarze.

Skład:

Chlorek sodu

Działanie:

Irigasin Zestaw do płukania nosa i zatok irygator + saszetki to komplet elementów niezbędnych do przygotowania roztworu do płukania i przeprowadzania tego zabiegu. Dołączone do irygatora saszetki zawierają chlorek sodu. Przeznaczone są do sporządzania roztworu izotonicznego albo hipertonicznego (w zależności od stężenia substancji czynnej). Obydwa roztwory skutecznie oczyszczają jamy nosowe i zatokowe z zalegającej w nich wydzieliny. W efekcie łagodzą objawy np. kataru i pomagają swobodnie oddychać. Ponadto pielęgnują i nawilżają uszkodzoną lub podrażnioną śluzówkę nosa lub zatok. Dodatkowo hipertoniczny roztwór chlorku sodu znany jest ze swojego działania osmotycznego, którego efektem jest wyraźne zmniejszenie obrzęku błony śluzowej. Irigasin Zestaw do płukania nosa i zatok irygator + saszetki obejmuje również irygator, który ma postać miękkiej butelki zakończonej ergonomicznym aplikatorem.

Przeciwwskazania:

nadwrażliwość na substancje składowe preparatu

Wskazania:

Produkt wykorzystywać u osób dorosłych i dzieci od 4 roku życia w celu złagodzenia objawów nieżyty nosa albo zatok. Polecany także jako środek pielęgnujący i nawilżający śluzówkę oraz po ekspozycji na wysokie stężenie pyłów w powietrzu.

Sposób użycia:

Stosować miejscowo do płukania nosa u osób dorosłych i dzieci od 4 roku życia. Wykorzystywać x 1-2/24h bądź zgodnie z zaleceniami lekarza. Aby przygotować roztwór hipertoniczny należy do butelki wsypać 2 sasz. produktu a potem uzupełnić ją do widocznej linii - 240 ml, przegotowaną, letnią wodą. Aby przygotować roztwór izotoniczny należy do butelki wsypać 1 sasz. produktu a potem uzupełnić ją do



Salutis Sp. z o.o.
Trześciowska 59i, Lublin
+48 605780782

widocznej linii - 240 ml, przegotowana, letnią wodą.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.