



Undofen Krioterapia aer.na skór. 50 ml



Cena: 60,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	50 ml (12 aplik.)
Postać	aer.na skórę
Producent	OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO
Substancja czynna	-

Opis produktu

Wskazania:

Undofen® Krioterapia usuwa brodawki za pomocą tej samej metody zamrażania, której używają lekarze:


1. Undofen® Krioterapia natychmiastowo zamroza brodawkę aż do korzenia. Po przyłożeniu aplikatora piankowego do brodawki skóra może stać się biała i może wystąpić lekki ból i pieczenie, będące reakcją na zamrażanie. Po odsunięciu aplikatora prawidłowy kolor skóry powróci. Uczucie pieczenia i niewielkiego bólu natychmiast się zmniejszy i powinno zaniknąć w ciągu kilku godzin.
2. Kiedy zamrażany obszar odtaje, może pojawić się zaczerwienienie. W wyniku zamrażania w ciągu kilku dni pod brodawką pojawi się pęcherz, który może nie być widoczny gołym okiem. Zamrożona brodawka powinna stopniowo zaniknąć lub odpaść po około 10-14 dniach, odsłaniając nowy, zdrowy naskórek.

Skład:

Pojemnik z aerozolem zawierający nieszkodliwą dla środowiska mieszkankęteru dimetylowego i propanu. CE 0344 • 1 uchwyt wielokrotnego użytku na aplikator piankowy. • 12 aplikatorów piankowych jednorazowego użytku wystarczających na 12 zastosowań. • 1 pilniczek wielokrotnego użytku CE. • Niniejszą ulotkę zawierającą szczegółowe informacje na temat brodawek, preparatu Undofen® Krioterapia, jego działania i skutecznego stosowania w celu usunięcia brodawek.

Sposób użycia:

Trzymając niebieski koniec aplikatora piankowego pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym, ścisnąć, aż pojawi się niewielki otwór. Wsunąć aplikator piankowy na wystający fragment uchwytu, tak aby fragment ten nie był widoczny. Przytrzymać pojemnik z aerozolem w pozycji pionowej, skierowany od siebie, z daleka od ognia, źródeł ciepła, bezpośredniego działania promieni słonecznych i jakichkolwiek źródeł energii elektrycznej. Umieścić uchwyt z aplikatorem piankowym w otworze na czubku pojemnika z aerozolem, tak aby aplikator piankowy nie był widoczny. Przytrzymując pojemnik z aerozolem jedną ręką od dołu, drugą ręką mocno wcisnąć uchwyt na aplikator w dół i przytrzymać przez 3 sekundy (liczyć od 21 do 23). Podczas przyciskania z pojemnika będzie wydobywał się syczący dźwięk. Usunąć uchwyt z aplikatorem piankowym z zaworu. Aplikator piankowy jest nasączony zimnym płynem, więc nastąpi kondensacja, która nie jest szkodliwa. Po nasączeniu aplikatora odczekać 20 sekund aby dodatkowo obniżyć jego temperaturę, co zapewni większą skuteczność preparatu Undofen® Krioterapia.

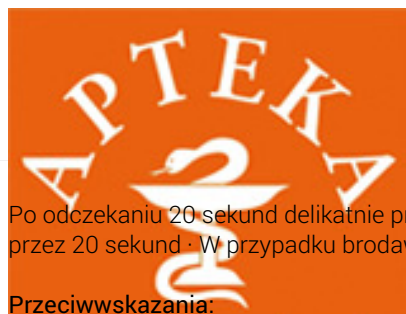

Po odczekaniu 20 sekund delikatnie przycisnąć aplikator piankowy do brodawki. W przypadku brodawek zwykłych: przytrzymać aplikator przez 20 sekund · W przypadku brodawek stóp: przytrzymać aplikator przez 40 sekund

Przeciwwskazania:

Jeśli nie ma pewności, że zmiana na skórze jest brodawką, należy skonsultować się z lekarzem. Produkt jest przeznaczony jedynie do użytku zewnętrznego; nie należy go połykać ani wdychać; używać tylko w przewiewnych miejscach. Nie stosować preparatu więcej niż 3 razy w tym samym miejscu. Jeśli trzykrotne zastosowanie preparatu nie przyniosło efektu, należy skonsultować się z lekarzem. · Wyrób medyczny Undofen® Krioterapia zawiera bardzo łatwopalne składniki: produkt należy stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w odległości przynajmniej 1 m od ognia, źródeł ciepła, bezpośredniego działania promieni słonecznych, źródeł energii elektrostatycznej i elektrycznej, włączając w to źródła światła. Nie palić tytoniu i trzymać produkt z dala od zapalonych papierosów. Nie wystawiać produktu na działanie temperatury powyżej 50°C (np. światła elektrycznego) w trakcie stosowania. Trzymać pojemnik w pozycji pionowej, kierując go w pustą przestrzeń od siebie; nie należy ustawiać go na twardej powierzchni. · Nie przekłuwać ani nie wrzucać pojemnika do ognia, nawet po zużyciu. · Przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.