



## Uromedium do oznaczania liczby komórek bakteryjnych



Cena: 17,24 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 poj.
Postać	-
Producent	BIOMED-KRAKÓW WYTW.SUR.I SZCZEP.
Substancja czynna	-

### Opis produktu

Uromedium składa się z dwóch stałych podłoży pokrywających plastikową płytkę umocowaną w nakrętce wewnątrz jałowego pojemnika (forma dip slide):

Podłoże 1 - podłoże CLED umożliwia wzrost większości bakterii będących najczęstszą przyczyną zakażeń układu moczowego. Podłoże CLED nie zawiera elektrolitu, co zapobiega pełzaniu *Proteus* sp.

Podłoże 2 - podłoże MacConkey`a umożliwia wzrost i wstępne różnicowanie pałeczek Gram-ujemnych. Pałeczki Gram-ujemne rozkładające laktozę rosną w postaci kolonii o zabarwieniu czerwonym (*Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*), natomiast pałeczki nie rozkładające laktozy tworzą kolonie bezbarwne lub różowe (*Proteus* sp.).

#### Zastosowanie:

Uromedium to zestaw podłoży transportowo-wzrostowych stosowany do bezpośredniego posiewu moczu w diagnostyce mikrobiologicznej zakażeń układu moczowo-płciowego. Dzięki podłożom pokrywającym obustronnie płytkę można dokonać oceny skażenia mikrobiologicznego badanej próbki oraz szybkiej identyfikacji wyhodowanych kolonii. Wszystkie badania dodatkowe, mające na celu identyfikację drobnoustrojów oraz oznaczenie ich wrażliwości na antybiotyki mogą być wykonywane z kolonii wyrosłych na podłożach Uromedium. Każdy zestaw stanowi bezpieczny system transportu posianego moczu do pracowni mikrobiologicznej.

#### Uromedium umożliwia:

- potwierdzenie lub wykluczenie skażenia mikrobiologicznego moczu po 16-24 godzinach;
- ocenę ilościową wszystkich drobnoustrojów odpowiadającą liczbie komórek bakteryjnych w 1 ml - porównanie ze wzorcem gęstości;
- ocenę ilościową i różnicowanie kolorystyczne kolonii bakterii Gram-ujemnych.

*Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub*



Salutis Sp. z o.o.  
Trześciowska 59i, Lublin  
+48 605780782

*farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.*